


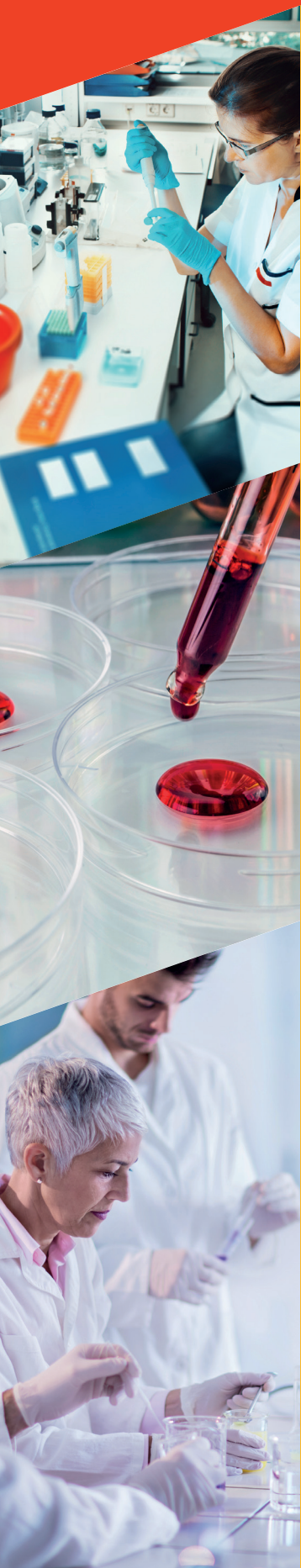

Unilabs



Abstrich für

MIKROBIOLOGISCHE

Untersuchungen



PROBENMATERIAL:

Abstriche für Bakterien, Pilze und molekulare Analysen.



PROBENGEFÄSS:

E-Swab-Röhrchen.



PROBENENTNAHME:

Nicht desinfizieren; Abstreichen am Wundgrund; Tupfer in Transportflüssigkeit eintauchen; Stiel an der Bruchstelle abbrechen; Röhrchen dicht verschliessen.
Pro Röhrchen immer nur 1 Tupfer belassen (z.B. dünner Tupfer für Urethralabstrich oder dicker Tuper für Wundabstrich).



PROBENAUFBEWAHRUNG:

Gekühlt.



TRANSPORT :

Bei Raumtemperatur, max. 24 Stunden.



BEMERKUNG:

Der Nachweis von Sprosspilzen (Hefen), Mycoplasmen, Ureaplasmen, Chlamydien muss extra angefordert werden.